



1000 pieds/ 300 mètres



55 sonneries



IP55 hydrofuge



0-110 db - 5 niveaux

Guide d'utilisation

Utilisation recommandée :

- Pour un bénéficiaire appelant le proche aidant à domicile.
- La pagette possède 5 sonneries différentes.
- La portée du signal est de 1000 pieds (300 mètres).
- 5 niveaux de volume ajustable allant de 0 dB à 110 dB.
- Installation facile.



Aimants de porte



Boutons d'appel




Détecteur de mouvement



Programmation :

Jumelage d'un capteur avec la pagette

1- Appuyez sur le bouton  et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. (La pagette sera en mode jumelage, vous avez 8 secondes pour faire des ajustements.)

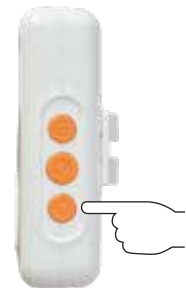

2- Sélectionnez le numéro que vous souhaitez en appuyant sur  et 

3- Déclenchez rapidement le capteur (détecteur de mouvement, aimant et bouton d'appel) La pagette fera un son et clignotera

4 Appuyez encore une fois sur le capteur pour confirmer le jumelage.

Supprimer la programmation :

Appuyer 5 sec. sur  La pagette émettra un ding en affichant le numéro 01

Comment l'utiliser :

Niveau sonore (jusqu'à 5 niveaux):

- Le volume de la pagette peut être ajusté en appuyant sur 
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volume augmente.
- Si le volume maximum est atteint, il retournera au niveau 1, ce qui est le mode silencieux.



Pour mettre mélodie ou alarme

Mettez l'interrupteur à alarme ou à ding/dong pour changer la mélodie.



Mettre Mode vibration

Appuyez et maintenez sur  et ON/OFF jusqu'au moment où le mode vibration se met en marche.



Changer la batterie :

La pagette indique qu'il faut changer ses batteries lorsqu'il y a un clignotement rouge.



La pagette indique qu'il faut changer la batterie du capteur lorsqu'il y a un clignotement bleu.



Comment utiliser les aimants:

1-Fermer la porte et coller une partie de l'aimant sur le cadre de la porte et l'autre partie sur la porte de façon à ce qu'elles soient côte à côte.

2-Lorsque la porte s'ouvre, si les aimants sont séparés de 4 pouces ou plus, le signal est envoyé au récepteur.

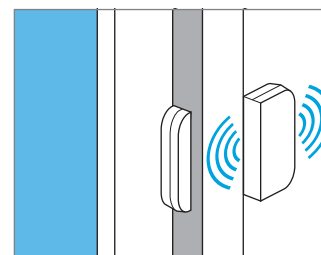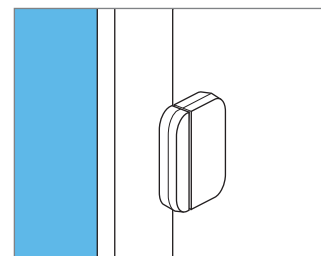

Problème ?

Si le récepteur ne sonne pas, c'est possiblement à cause de l'une de ces situations

- 1- Les batteries du bouton d'appel n'ont plus d'énergie.
- 2- La batterie sont insérer de la mauvaise manière.
- 3- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence électromagnétique entre le bouton d'appel et le récepteur.
- 4- La distance de connectivité est réduite lorsqu'il y a des murs ou des objets métalliques entre le bouton d'appel et le récepteur.

