

# Guide d'utilisation

## Utilisation recommandée :

- Pour un bénéficiaire appelant le proche aidant à domicile.
- La pagette possède 5 sonneries différentes.
- La portée du signal est de 1000 pieds (300 mètres).
- 5 niveaux de volume ajustable allant de 0 dB à 110 dB.
- Installation facile.



Aimants de porte



Boutons d'appel



Détecteur de mouvement

## Installation:

Jumelage d'un bouton avec le récepteur

1- Appuyez sur le bouton  et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son. (La cloche sera en mode jumelage, vous avez 8 secondes pour faire des ajustements.)


2- Déclenchez rapidement le capteur (détecteur de mouvement, aimant et bouton d'appel) La pagette fera un son et clignotera

3- Appuyez encore une fois sur le capteur pour confirmer le jumelage.



## Comment l'utiliser :

### Niveau sonore (jusqu'à 5 niveaux):

- Le volume de la pagette peut être ajusté en appuyant sur 
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volume augmente.
- Si le volume maximum est atteint, il retournera au niveau 1, ce qui est le mode silencieux.


### Changer la mélodie :

La mélodie peut être définie sur l'une des 5 sélections.

Appuyez sur le bouton  pour choisir la mélodie.

### Mettre Mode vibration

La mélodie peut être définie sur l'une des 55 sélections.

Appuyez sur le bouton  ou  pour choisir la mélodie.






### Changer la batterie :

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche.

Retirez les trois vis à l'aide d'un tournevis philips et retirez le couvercle protecteur.

Retirez et changez la batterie.



Remplacez le couvercle protecteur avec les vis et faites glisser le couvercle arrière.

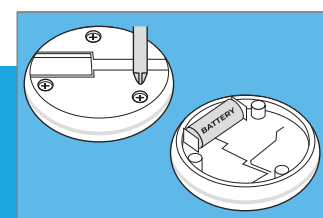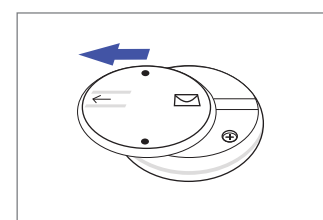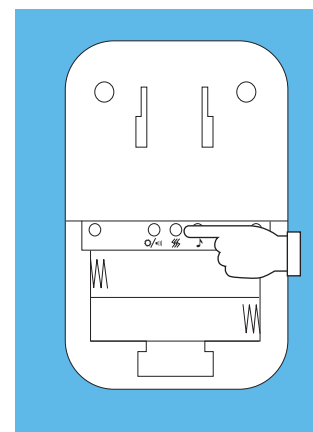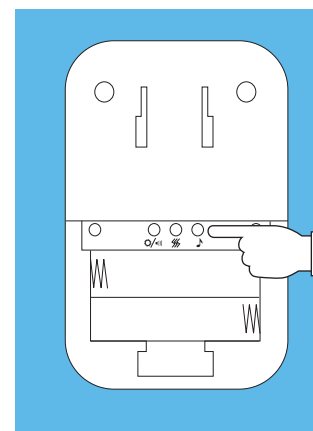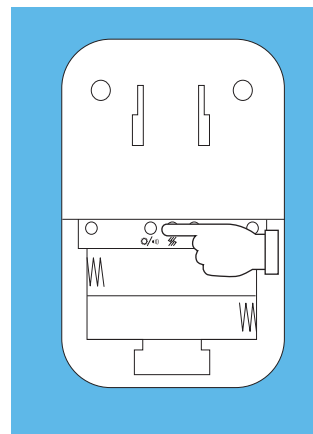

## Comment utiliser les aimants:

1-Fermer la porte et coller une partie de l'aimant sur le cadre de la porte et l'autre partie sur la porte de façon à ce qu'elles soient côte à côte.

2-Lorsque la porte s'ouvre, si les aimants sont séparés de 4 pouces ou plus, le signal est envoyé au récepteur.

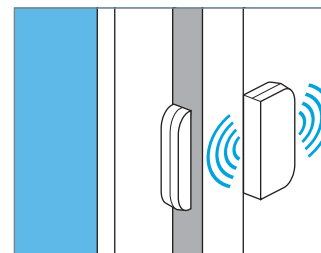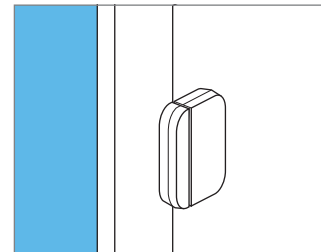

## Comment supprimer la connection des capteurs avec la pagette :

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le jusqu'au moment où vous attendez un bip.

### Problème ?

Si le récepteur ne sonne pas, c'est possiblement à cause de l'une de ces situations

- 1- Les batteries du bouton d'appel n'ont plus d'énergie.
- 2- La batterie sont insérer de la mauvaise manière.
- 3- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence électromagnétique entre le bouton d'appel et le récepteur.
- 4- La distance de connectivité est réduite lorsqu'il y a des murs ou des objets métalliques entre le bouton d'appel et le récepteur.

